

SUPPORT PRO





Vi har udviklet på Supportserien siden begyndelsen af 90'erne, hvilket har givet os stor indsigt i positioneringsproblematikker. Vi er glade for at kunne tilbyde en ny opdateret Supportserie! Opdateringen gælder bl.a. design, flere modeller og varianter.

Hoftebælter

Vi tilbyder 3 typer hoftebælter. Sittbelt med 2 eller 4 fastgørelsespunkter, samt antirotationsbælte.



Seler

Vi har to forskellige typer af seler, H-sele og Sternumstøtte.



Ankelbæspænding

Ankelbæspændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fod-pladerne. Ankelbæspændingen monteres på forskellige fodstøtter ved at skrue fæstestropperne i fod-pladen.



Fodstrop

Med en fodstrop er det nemt at positionere foden. Fodstroppen monteres i fodpladen. tilbydes også uden polstring.



Armbind

Armbindet monteres diagonalt for at forhindre overstræk. Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.



Håndmanchet

Håndmanchetten kan være en hjælp for dem, som har besvær med at holde hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.



Vaskbart ved 60°

Samtlige seler og bæltter kan vaskes ved 60°. Samtlige materialer er vand- og smudsafvisende og nemme at tørre af. Det anbefales at vaske dem i vaskepose.



Eksklusiv



Pro

Vi har to forskellige materialer at vælge imellem, når det kommer til polstring og tre forskellige modeller.

- **Eksklusiv** har et skind look med gode aftørringsegenskaber.
- **Pro/SOFT** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber.

Hoftebælter

- Til positionering af bækkenet

Hoftebæltet kan have en afgørende betydning for sikkerheden og for at brugeren sidder i korrekt position i sin kørestol eller siddesystem.

Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtigt, som en trykaflastende pude. SittBelt anvendes for at holde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædeknoglerne, eller træk i huden.

Vi har tre forskellige hoftebælter:

- **Sittbelt comfort**

Et enkelt hoftebælte, der ofte bl.a. bruges til komfortstole. Det har to fastgørelsesstropper og fås i forskellige størrelser afhængigt af hoftebredden. Forskellige spænder kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der kan fastgøres til stropperne eller være flydende (aftagelig). bæltepuderne er fremstillet i det behagelige materiale Soft.

- **Sittbelt**

Anvendes ofte i sæder / siddesystemer og mere avancerede kørestole. Egnede til alle typer brugere og giver god positionering og modvirker fremadskridning. Hoftebæltet har fire fastgørelsesstropper og tilbydes i forskellige størrelser beroende på hoftebredden. Forskellige spænder kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der kan fastgøres til stropperne eller være flydende (aftagelig). bæltepuderne er fremstillet i det behagelige materiale Soft.

- **Antirotationsbælte**

Anvendes ofte i individuelt udformede sæder (støb) / siddesystemer. Giver meget positionering og modvirker fremadskridning og rotation af bækkenet. Det har fire stropper og fås i forskellige størrelser afhængigt af hoftebredde. Bæltepuderne er fastgjort til fastgørelsesstropperne og fås i materialerne Soft eller gel, for den bedste komfort.

Spænderne

Hoftebælterne/Y-selerne har forskellige spænder for at passe til brugeren og forskellige mål for at trækretninger og placering kan tilgodese forskellige behov. Nogle af spænderne, kan der bestilles sikkerhedskappe til for at forhindre ufrivillig åbning.



Sittbelt comfort



Sittbelt



Antirotationsbælte

Nu også med Gel



Brystseler

- Til postural kontrol

God postural kontrol fører til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har således muligheden for både at korrigere og opretholde overkroppens placering på baggrund af de forhold, vi står over for.



H-SELE

H-selen giver støtte til både skulderparti og krop. Den bruges ved rotation og til brugere med fremadfald. Passer også godt til borgere, som bruger sonde.



SERNUMSTØTTE

Sernumstøtten giver en koncentreret støtte over sternum, for at modvirke at overkroppen falder fremover.



SERNUMVEST

Har samme egenskaber som Sernumstøtten, men kan åbnes med en lynlås i midten.



SKULDERSELE

Skulderselen har en god polstring og giver støtte til skulderpartiet. Der er store variationsmuligheder for brugeren, da de let kan justeres. Kan positionere en side af overkroppen, for eksempel når skuldrene ikke er parallelle.



BRYSTBÆLTE

Brystbæltet har en hel bred polstring. Bæltet har to bspændingspunkter.



THORAXSELE

Thoraxselen er fremstillet til brugere med lav muskel tonus. Selen hjælper til at positionere gennem et løft helt nede fra lænderyggen.



Husk altid at kombinere en brystsele med et hoftebælte.

Ankelbæspænding

- mod ufrivillig supination og pronation

Ankelbæspændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fodpladerne. Ankelbæspændingen monteres på forskellige fodstøtter ved at skrue fæstestropperne i fodpladen. Ankelbæspænding tilbydes i fire størrelser. Størrelsen vælges ud fra målet omkring ens ankel. Bæspænding kan fås med spænde eller velcro.



Ankelbæspænding med tre bæspændingspunkter og spænder.



Ankelbæspænding med tre bæspændingspunkter og velcro



Tilbydes
også i
blå

Fodstrop

- til positionering af foden

En enkel måde at positionere fødderne. Stroppe monteres i fodpladen. Kan fås med eller uden pude.

Vores fodstroppe tilbydes i 20 mm og 25 mm stropbredde og i længderne 45 eller 60 cm.

Lukningen fås med velcro eller med et spænde.

Vælg model og størrelse baseret på behov og båndlængde.



Fodstrop



Fodstrop med pude



Fodstrop med spænde

NYHED

Armbind

- mod overstræk

Armbindet monteres diagonalt for at forhindre overstræk og for at armene ikke skal have udenfor siddesystemet eller kørestolen.

Armbind tilbydes i tre størrelser. Størrelsen bestemmes ud fra omkredsen på håndleddet (13, 17, 21 cm). Tilbydes i materialet Soft og Soft-Skai (med Skai på ydersiden og Soft på indersiden, ind mod kroppen). Sælges i sæt.



Håndmanchet


- til opnåelse af et bedre greb

Håndmanchetten kan være en hjælp for dem, som har besvær med at holde hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.

Den er meget nem at montere og kan sættes på uden at brugeren har brug for at lægge hånden i den. Den sættes helt enkelt på, når brugeren allerede holder styret i henhold til billedserien nedenfor.

Håndmanchet fås i tre størrelser, der passer til både højre og venstre hånd.

Sælges stykvis.

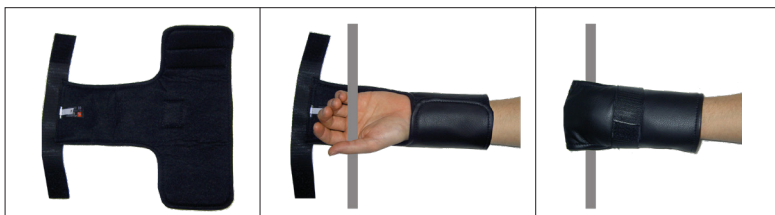

Anatomic Universalbælte

- flexibelt bælte

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesområder. Anvend det som støtte rundt om hoften, lårerne eller benene, brystet, eller andet.

Designet gør det nemt at afkorte efter behov.

Anatomic Universalbælte, som trinløst ved hjælp af en velcro-lås kan fastgøres, nøjagtigt, hvor man ønsker det. Velcrolåsen er ekstrem stærk i trækretningen.

Universalbæltet tilbydes i to forskellige længder (145, 225 cm) og tre forskellige bredder (9, 12, 15 cm).



Blåt sortiment

- produkter som passer til bad- og toiletstole

Produkterne i den blå serie tilbydes i begrænset antal lagerførte modeller og passer til bad- og toiletstole, herunder også Anatomic hygiejne støb.



Monteringstilbehør

Vi har udviklet flere forskellige monteringssæt til både hoftebælter og brystseler. Disse kan bruges på vores egne siddesystemer og kørestolsstel, men også på andre kørestole på markedet. Se alle muligheder i vores bestillingsguide.



FMK® - Fæste mellem kørehåndtag

FMK (fæste mellem kørehåndtag) er et universal monteringsbeslag. Universal beslag til at lette montering af seler og hovedstøtte. Monteres på kørestolens kørehåndtag/rygrør. Fæste til hovedstøtte indgår. Kan også anvendes for at få den rette trækretning for positioneringsstøtten.

Forhøjningsstang passer sammen med FMK både til 25 mm og 40 mm bånd. Fæste til hovedstøtte indgår som standard.

FMK kan afmonteres uden brug af værktøj.



Monteringsguide

- findes på hjemmesiden

Vi har lavet en guide med forslag til, hvordan man kan montere vores hoftebælter og seler på andres kørestole.

Få balance i kroppen

med



Monteringseksempel på Azalea Invacare:
Sittbelt med fire brespændingspunkter.