

MagniLink iTAB



Alt-i-én løsning til iPad

MagniLink iTAB er en bærbar og fleksibel løsning, der gør det muligt at bruge et læsekamera sammen med en iPad. Denne kombination bliver et alsidigt og nyttigt visuelt hjælpemiddel i et kompakt format, der er let at tage med overalt.

Kompakt løsning til iPad

MagniLink iTAB er udviklet til og tilsluttes direkte til Apples iPad-modeller via USB-C-stikket. Det vipbare stativ til iPad'en gør brugen ergonomisk, og et ekstra stik muliggør opladning af iPad'en, mens systemet er i brug. MagniLink iTAB kan leveres med et læse/afstandskamera med fantastisk billedkvalitet, men du kan også tilslutte et MagniLink læsekamera*, hvis du allerede har et. Sammen med iPad (medfølger ikke) bliver dette et alsidigt visuelt hjælpemiddel!

Det fleksible format er perfekt til dem, der ønsker at kunne bruge deres system forskellige steder, for eksempel i hjemmet og på arbejdspladsen, men måske frem for alt i skolen. Det er udmærket muligt at dele billedet på skærmen, så du samtidig kan læse fra en bog eller anden trykt tekst ved hjælp af iPadens kamera – og dele informationen på en tavle i klasseværelset med iTAB'ens afstandskamera. Det er også muligt at dele billedet med andre applikationer på iPad.

Alternative løsninger til iPad

For dem, der ønsker eller har brug for at kunne oprette forbindelse trådløst til deres iPad, findes der også MagniWifi og MagniLink WifiCam. Læs mere på www.lvi.dk.

Software med mange muligheder

Hjertet i systemet er MagniLink Viewer, vores primære software, som nemt kan downloades fra App Store. Softwaren tilbyder forskellige visningstilstande, der giver øget læsehastighed, læseudholdenhed og en mere afslappet læsning. Du kan også tilgå både digitale og trykte dokumenter. OCR-funktion er altid inkluderet, som giver mulighed for at få læst både trykt og digital tekst op. Dette er en meget værdsat funktion for dem, der synes, at læse er trættende.

MagniLink Viewer understøtter iPadens touchskærm og det er skønt at styre systemet med fingrene på skærmen, men også ved hjælp af hurtige kommandoer via et Bluetooth-tastatur.

Kompetent kombination

Sammen med iPadens egne apps får du et meget komplet og kompetent system med masser af anvendelsesområder.



* Fungerer med nogle MagniLink S scannere og iPads. For mere information og systemkrav på www.lvi.dk under Produkter > Læsekamera > MagniLink WifiCam.



Modeloversigt*

Art nr	Stand	Kamera	Passer til iPad model
ML-iTAB-SC-13PRO	Ja	Ja	iPad Pro 13"
ML-iTAB-S-13PRO	Ja	Nej	lpad Pro 13"
ML-iTAB-SC-12,9	Ja	Ja	lpad Pro 12,9" **
ML-iTAB-S-12,9	Ja	Nej	lpad Pro 12,9" **
ML-iTAB-SC-11	Ja	Ja	iPad Pro 11" **
ML-iTAB-S-11	Ja	Nej	lpad Pro 11" **



Med kamera



Uden kamera

*iPad er ikke inkluderet og skal købes separat. **Der er specifikke systemkrav til den iPad, der skal bruges sammen med MagniLink iTAB. For opdateret information om systemkrav, se venligst vores hjemmeside; <https://lvi.dk/catalog/products/magnilink-itab>. Vælger du en MagniLink iTAB uden kamera, kan visse MagniLink kameraer bruges, for eksempel en MagniLink S, fremstillet fra 2021-11-01.

Teknisk specifikation

MagniLink iTAB

Vægt	3,0 kg
Dimensioner	Sammenklap.: 36,5x30x3 cm Sammenfold.: 23x31x35 cm

Eksternt kamera

Forstørrelse	0,9-50x (højde 33 cm, iPad Pro 12,9")
Billedhastigh.	60 Hz
Længde	Kamera og arm: 62 cm
Vægt	700 g



LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.



MagniLink TAB 2024-11-01



LVI Danmark ApS

Hørkær 24, st. tv.

2730 Herlev, DANMARK

Tel: +46 (0)57 67 20 99

E-mail: info@lvi.dk

WWW.LVI.DK

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

352 46 Växjö, SWEDEN

Tel: +46 (0)470 72 77 00

Fax: +46 (0)470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE