

MULTIFUNKTIONEL GULVLIFT

Maxi Move[®] 5

Få pleje til at lykkes



Det her er Arjo



Hovedkontor

Malmö

Sverige



Grundlagt

1957



Medarbejdere

>6.500

globalt



Globalt

>100

lande, hvor Arjos
produkter og
serviceydelser sælges



Vores vision

At være den mest pålidelige partner, når det drejer sig om at skabe sunde resultater for mennesker, der står over for mobilitetsudfordringer.



Bæredygtighed

Vi skaber bæredygtig værdi for plejemodtagere, plejepersonale og plejere og for samfundet som helhed. Bæredygtig sundhedspleje starter med styrkelse af bevægelse.

Empowering Movement

Arjo fremmer Empowering Movement, dvs. styrkelse af bevægelse, så vi kan skabe bedre sundhedsresultater for mennesker med mobilitetsudfordringer



Forebyggelse
af indvirkningen
af immobilitet



Fremme større
mobilitet med
værdighed



Beskyttelse af
plejepersonalets
trivsel



Optimering af
omkostninger og
effektivitet i plejen

Se filmen Empowering Movement



Vores kliniske vurderings-værktøj

Hospitalspatienter
Pleje på hospitalsområdet

Plejemodtagere
Langtidspleje

Overvægtige plejemodtagere
Bariatrisk pleje

Specialplejeklienter
Specialpleje



ALBERT



BARBARA



CARL



DORIS




EMMA



Arjo- filosofien The Positive Eight[©]

Det rigtige **arbejds miljø**,
de **rigtige hjælpemidler** og
de **rigtige plejekompetencer**
skal være på plads,
før I kan udnytte alle
fordelene i Positive Eight.

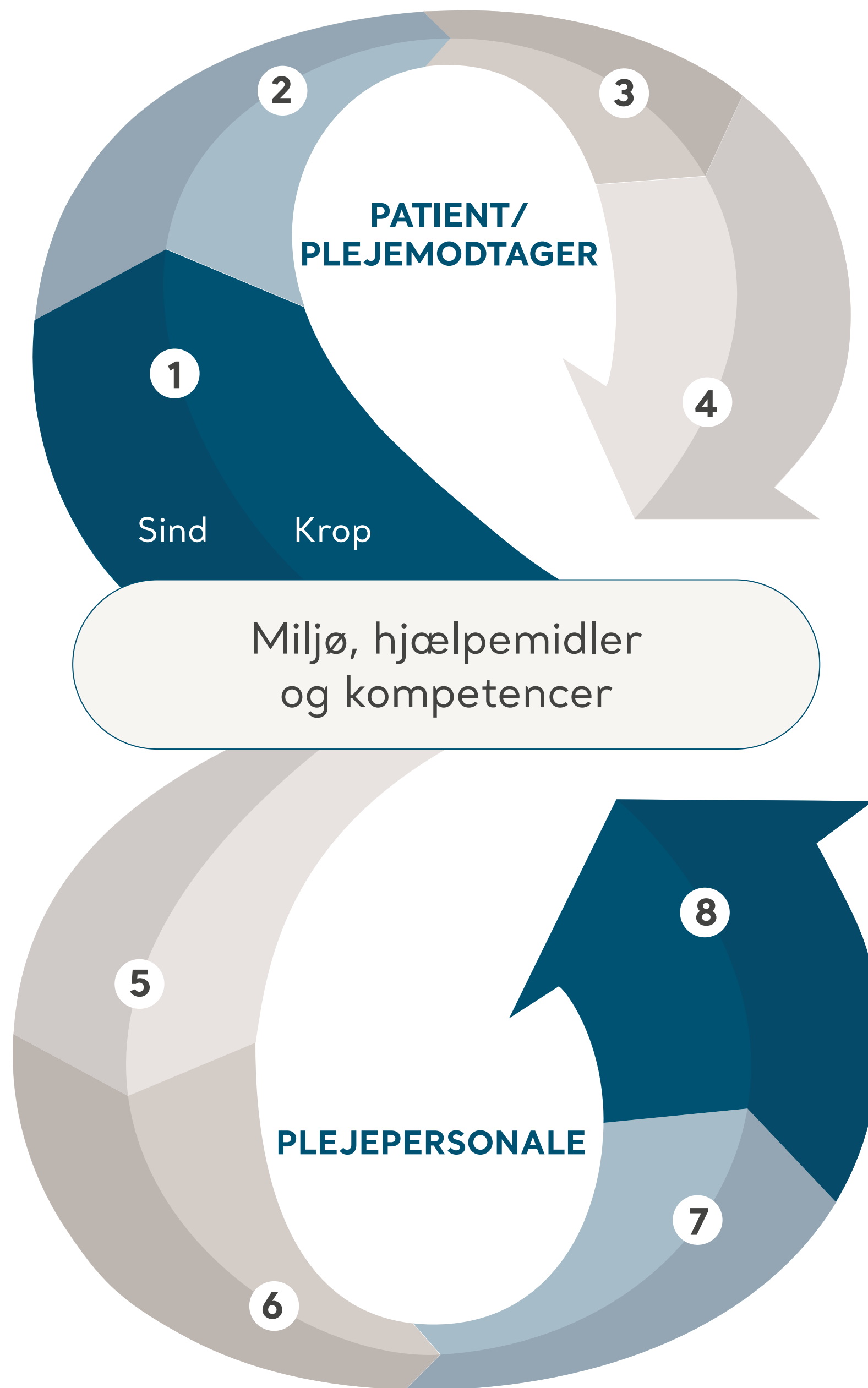

- 1 Mobilitet
- 2 Forbedring af vitale funktioner
- 3 Reducerer negative konsekvenser af immobilitet
- 4 Livskvalitet
- 5 Mindre behov for støtte
- 6 Færre skader og større effektivitet
- 7 Lavere sygefravær, lavere medarbejderudskiftning og færre erstatningskrav
- 8 Bedre pleje og økonomiske resultater

Se videoen om Positive Eight



INDLEDNING

Maxi Move® 5

Få pleje til at lykkes



Afspil kampagnevideoen om Maxi Move® 5



Arbejdsgangene i sundhedssektoren er under pres

Mennesker lever længere og har stadig mere komplekse, længerevarende sundhedsbehov.¹

Efterspørgslen efter mere effektive processer og arbejdsgange vil stige mere og mere.²

Samtidig er der en voksende mangel på plejepersonale.³

1 ud af 8
sygeplejestillinger
forbliver ledig³

Er dine medarbejdere under pres for at få mere gjort på kortere tid?

1. <https://www.england.nhs.uk/future-of-human-resources-and-organisational-development/the-future-of-nhs-human-resources-and-organisational-development-report/evolving-to-meet-a-changing-world>. Tilgået 25.03.2024

2. State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization; 2020.

3. NHS Vacancy Statistics England April 2015 – September 2022 Experimental Statistics



Immobilitet er dyrt – på mange måder

Immobilitet medfører komplikationer som deconditionering, tryksår, trombose i dybtliggende årer, lungebetændelse og urinvejsinfektioner.²

Dette resulterer i fald, morbiditet, mortalitet og længerevarende plejeophold.^{1,3}

Den økonomiske byrde fra disse problemer, der kan forebygges, løber op i milliarder af amerikanske dollars om året.^{4,5}

Hvor meget fokuserer du på at forebygge disse komplikationer på din institution?

1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>

2. Wu X, Li Z, Cao J, Jiao J, Wang Y, Liu G, Liu Y, Li F, Song B, Jin J, Liu Y, Wen X, Cheng S, Wan X. The association between major complications of immobility during hospitalization and quality of life among bedridden patients: A 3 month prospective multi-center study. PLoS One. 2018 Oct 12;13(10):e0205729. doi: 10.1371/journal.pone.0205729. PMID: 30312330; PMCID: PMC6185860.3. Int Wound J. 2019 Jun;16(3):634–640. doi: 10.1111/iwj.13071. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30693644; PMCID: PMC7948545.

3. Int Wound J. 2019 Jun;16(3):634–640. doi: 10.1111/iwj.13071. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30693644; PMCID: PMC7948545.

4. Yang X, Chen H, Zheng Y, Qu S, Wang H, Yi F. Disease burden and long-term trends of urinary tract infections: A worldwide report. Front Public Health. 2022 Jul 27;10:888205. doi: 10.3389/fpubh.2022.888205. PMID: 35968451; PMCID: PMC9363895.

5. <https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm>. Tilgået 25.03.2024

Manuel forflytning og repositionering af plejemodtagere medfører risiko for **personskade** for plejepersonalet

Plejemodtagerhåndtering er en væsentlig årsag til smerter og skader for sygeplejersker og behandlere.^{1,2}

59 % af disse skader **skyldes repositionering** eller forflytning af plejemodtagere og forebyggelse af fald.³

Hver dag, der går tabt til restitution, belaster ressourcerne mere.⁴

Faktorer, der påvirker plejepersonaleskader¹

- Plejepersonalets antal, kapacitet, erfaring og kvalifikationer
- Antal, type og tilstand af plejemodtagere
- U hensigtsmæssige stillinger og anstrengelser
- Utilstrækkeligt udstyr
- Begrænsede plejeområder
- Manglende uddannelse i specifikke opgaver

8.730

dage tabt på grund af skader på plejepersonale³

Er jeres plejelinstitution påvirket af plejepersonaleskader?



1. ISO/TR 12296:2012 Ergonomics – Manual Handling of People in the Healthcare Sector, 2012

2. Richardson et al. Perspectives on preventing musculoskeletal injuries in nurses: A qualitative study. Nursing Open. 2019. 6;915-929

3. Daragh A, et al. Safe Patient Handling Equipment in Therapy Practice: Implications for Rehabilitation. The American Journal of Occupational Therapy. 2013

4. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-344



Forskellige plejemodtagere + individuelle behov = stigende kompleksitet af plejeopgaverne

Antallet af plejemodtagere med individuelle behov fortsætter med at stige.

Og de samme opgaver kan stille meget forskellige krav til plejepersonalet, når plejemodtagerne er ældre, overvægtige eller lever med demens.

Overvægtige plejemodtagere kræver ofte mere plejepersonale,^{1,2} mens antallet af mennesker, der lever med demens, stiger år for år.³

Kan du imødekomme de stadigt mere forskellige behov hos plejemodtagerne i din pleje?

1. World Health Organisation 2013. 10 facts on obesity. Tilgængelig fra: <http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en> Tilgået marts 2024

2. Muir, M.A. and Rush, J.A. (2013) Moving and Handling of Plus Size People – an illustrated guide, Towcester: National Back Exchange, 9.

3. World Health Organization (2023). Dementia: Key Facts. <http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/dementia> - tilgået 25.03.2024

Hospitalserhvervede infektioner er stadig et stort problem

Hospitalserhvervede infektioner (HAI'er) fører til komplikationer i hele plejesystemet og koster titusindvis af liv, millioner af hospitalsdage og milliarder af dollars årligt.^{1,2,3}

Ikke-kritisk medicinsk udstyr spiller en af de vigtigste roller i forbindelse med infektionsoverførsel.^{4,5}



Hvilke protokoller for forebyggelse af hospitalsinfektioner følger I på jeres institution?

1. Friedman, N.D et al (2018) Towards a Definition for Health Care-Associated Infection. Health Care-Associated Infection Definition. Open Forum for Infectious Diseases.
2. Haque, M et al (2018) Health care-associated infections – an overview. Infection and Drug Resistance 2018;11 2321–2333
3. Bianco, A et al (2018) Prospective surveillance of healthcare associated infections and patterns of antimicrobial resistance of pathogens in an Italian intensive care unit. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2018) 7:48
4. Guest, J.F et al (2019) Modelling the costs and consequences of reducing healthcare-associated infections by improving hand hygiene in an average hospital in England. BMJ Open
5. Centre for Disease Control (2019) Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). July 2003. Opdateret 2019. Tilgængelig version: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html>

MULTIFUNKTIONEL GULVLIFT

Maxi Move[®] 5

Få pleje til at lykkes



Maxi Move® 5

Når opgaverne er krævende,
er **effektivitet** nøglen til
at få pleje til at lykkes.

Mobilitetsbehov og -situationer
ændrer sig konstant.

Men behovet for **sikkerhed** forbliver
– for både plejemodtagere
og plejepersonale.

Maxi Move® 5 giver dig **alsidigheden**
til at få pleje til at lykkes.



Afspil demovideoen om Maxi Move® 5



EFFEKTIVITET

Intuitiv manøvredygtighed med Arjo Motion Assist™



Eldrebet - for mindre muskelanstrengelse og mere præcis positionering

Med Arjo Motion Assist™-systemet er Maxi Move® 5 designet til at lette belastningen ved manøvrering og gøre positionering mere præcis inden for begrænsede plejeområder.

Maxi Move® 5's berøringssensorer, der reagerer på skub, træk og drejebewægelser, gør det muligt for plejepersonalet at foretage mere effektive, kontrollerede og intuitive forflytninger - til plejemodtagere på op til 272 kg.

EFFEKTIVITET

Effektiv positionering med en enkelt hjælper

Maxi Move® 5 kan drejes på plads, hvilket muliggør kontrollerede, effektive forflytninger **selv på de trangeste steder.**

Ved at reducere den fysiske indsats og den tid, der kræves, kan opgaver udføres af et enkelt hjælper, hvilket giver mere tid til at fremme komfort og personcentreret pleje.



Arjos Powered
Dynamic Positioning
System muliggør
den mest nøjagtige
positionering i én
enkelt manøvre¹

1. Fray M, D'Arcy L, 2024. Powered drive and positioning systems in patient floor lifts reduce caregiver workload.

Afspil videoen om klinisk anvendelse af Maxi Move® 5



EFFEKTIVITET

Designet til personer med kognitive udfordringer

Kognitive udfordringer kan være krævende for plejearbejdsgangen.

Maxi Move® 5 er designet til at støtte plejepersonalet ved at fokusere på behovene hos personer med kognitive udfordringer.

Dens runde hjørner, bløde løft, støjsvage drift og kontrastfarver fremmer værdigheden og komforten for plejemodtageren – og effektive plejearbejdsgange for plejepersonalet.

Maxi Move® 5 rangerede højest, hvad angår komfort og sikkerhed for plejemodtagere under bevægelse og forflytninger¹



¹. Fray M, D'Arcy L, 2024. Powered drive and positioning systems in patient floor lifts reduce caregiver workload.



SIKKERHED

Ergonomisk design, der reducerer plejepersona- lets indsats

68 %
kraftreduktion
sammenlignet med
andre gulvliftløsninger
på markedet¹

Maxi Move® 5 er designet til plejepersonalets sikkerhed med mindre fysisk anstrengelse i alle faser: **assisteret skub, træk, vending og løft** betyder, at plejemodtagerens position er mere tilbøjelig til at blive korrekt første gang.

**Mest foretrukne.
Nedsat risiko for læsioner.**

1. Fray M, D'Arcy L, 2024. Powered drive and positioning systems in patient floor lifts reduce caregiver workload.

SIKKERHED



Fremme sundere resultater gennem mobilitet

Designet til at mindske
virkningerne af immobilitet.
Maxi Move® 5's brede
udvalg af afstandsbøjler
og sejl giver mulighed
for funktionel mobilitet
og sundere resultater.



Hjælper dig med at minimere risikoen for krydskontaminering

Valg af udstyr, der er designet til nem rengøring og desinfektion, er afgørende for at minimere risikoen for krydskontaminering.¹

Med sine glatte, ikke-porøse overflader og let tilgængelige adgangspunkter er Maxi Move® 5 nem at rengøre og desinficere.

1. Kanamori H, Rutula W, Weber D. (2017) The Role of Patient Care Items as a Fomite in Healthcare-Associated Outbreaks and Infection Prevention. Clinical Infectious Diseases 65(8):1412–1419

FLEKSIBILITET



Forskellige plejemod- tagerbehov – én løsning

Forflytninger er lige så forskellige som de mennesker, der har brug for dem.

Maxi Move® 5 fås i to varianter – alsidige nok til at opfylde kravene til en lang række plejemodtagerprofiler og behov.

FLEKSIBILITET

Forskellige opgave- behov – én løsning

Plejebehov og -situationer er forskellige.
Tilpasningsevne er afgørende.

Maxi Move® 5's brede udvalg
af afstandsbøjler og sejl giver
plejepersonalet mulighed for at
gøre mere med en enkelt enhed.



Maxi Move® 5

KAPACITET*

Maxi Move® 5 fås i to varianter (227 kg og 272 kg) for at opfylde kravene til sikker arbejdsbelastning

VÆGT*

Indbygget vægt understøtter en effektiv vejerutine

COMBI-FASTGØRING

Combi-fastgøring gør det nemt og ubesværet at skifte mellem forskellige afstandsbøjler og bårerammer

POWERED DYNAMIC POSITIONING SYSTEM (PDPS)

Minimerer manuel håndtering og gør det muligt at placere plejemodtagere med større præcision

HJULSTØRRELSE*

Tre hjulstørrelser er tilgængelige: standard, lave og ekstra lave, der giver nemmere adgang under lave plejemodtagerlejer

BREMSEKNAP

Bremserne er nemme at aktivere og deaktivere på soklen



BELAGT LØFTEREM

Løfteremmen er belagt med et ikke-porøst materiale, som minimerer risikoen for krydskontaminering og mikrobiel vækst, da den er nem at rengøre

LODRET TELESKOPSTANDER

Lodret stander sørger for stabilitet, mens plejemodtageren løftes

MOTION ASSIST *

Elektrisk drev, der betjenes via berøringssensorer på plejepersonalets håndtag, som reagerer på skub, træk og drejebevægelser, hvilket muliggør effektive, kontrollerede og intuitive forflytninger

DOBBELT BETJENING

Dobbelte betjeningsknapper på masten og håndbetjeningen gør det muligt for plejepersonalet at være tæt på plejemodtageren under hele forflytningen

DOBBELT DRIFT

Under liftdrift kan to funktioner bruges samtidigt for at forbedre effektiviteten

Produkter



Håndtering af plejemodtagere



Hospitalssenge



Hygiejne og velvære



Desinfektion



Forebyggelse af trykskader



Forebyggelse af VTE



Behandling og forebyggelse af bensår



Diagnostik

Løsninger



Tidlig mobilisering



Pleje af demente



Pleje på bariatriområdet



Rehabilitering



Forebyggelse af plejemiljøpådragede lidelser



Arjo MOVE®



Leje og finansiering



Arjo Care

Service

Hos Arjo tror vi på, at bedre bevægelsesmuligheder i plejemiljøerne er afgørende for kvalitetspleje. Vores produkter og løsninger er designet til at fremme en sikker og værdig oplevelse gennem håndtering af plejemodtagere, hospitalssenge, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og forebyggelse af tryksår og venøs tromboemboli. Med over 6.500 medarbejdere på verdensplan og 65 års erfaring med at hjælpe plejemodtagere og sundhedspersonale arbejder vi engageret for sunde resultater for mennesker, der står over for mobilitetsudfordringer.

Kun originaldele fra Arjo, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af Arjo.

Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel. ® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernens selskaber.

Arjo AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
Sweden
+46 10 335 4500

© Arjo, 2024
www.arjo.com

arjo

Arjo.A00724.2.0.DK.DA