

Brugervejledning CARELINE TWIST

Formål

Robust og rengøringsvenlig TWIST, med stel af stål og aluminium.

Den lave indstigningshøjde gør det nemt for brugeren at placere fødderne korrekt på platformen. TWIST aktiverer og støtter samtidig personer med nedsat styrke i ben eller med nedsat balance i at rejse og sætte sig, og til sikker kort forflytning mellem stol, kørestol, toilet eller seng.

Anvendelse

TWIST køres ind under brugernes fødder før denne rejser sig op, og brugerens knæ støttes imod knæpuden.

Hjælperen låser bremsen ved at trykke på denne. Det er dog ikke alle modeller der har bremse.

Brugeren holder fast i håndtagene under forflytningen, og ved endt flytning slippes bremsen igen (hvis der er bremse), og TWIST kan rulles væk.

Leveres uden bremse, med enkelt bremses eller central bremse.

Rengøring og vedligeholdelse

Brug en tør eller fugtig fiberklud til rengøring af TWIST, hvis det er nødvendigt, kan milde rengøringsmidler anvendes, derefter skylles med varmt vand.

Brug ikke opløsningsmidler, alkohol-baserede desinfektionsmidler, grove rensedmidler.

Advarsel!

Max. Brugervægt 150 Kg.



Faaborg Rehab Technic
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.
Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: fr@faaborg-rehab.dk www.faaborg-rehab.dk