


Uno 102

Brugsvejledning

Dansk

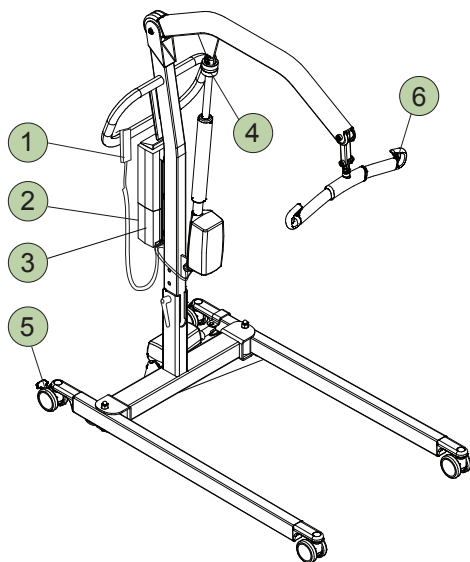

Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løftetilbehør inden anvendelse.
- Planlæg løftet nøje.
- Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt påhægtet løftebøjlen.

• Maks. last Uno 102: 175 kg

For at bibeholde maks. last kræves tilbehør der overholder samme belastning eller mere.

VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra www.liko.com.


1 Håndbetjening




- ↑ Op
- ↓ Ned
- ⊕ Spredning af understellet
- ⊖ Samling af understellet
- ☀ Indikerer lav batteristand

2 Nødstop


Aktivering:

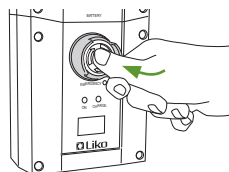

Deaktivering:

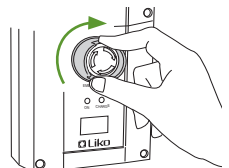


3 Elektrisk nødsenkning

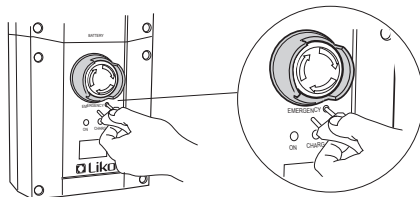


⚠ Genstanden, som anvendes til at trykke ind med, må ikke være for skarp, da dette kan medføre beskadigelse af kontrolboksen!


4 Mekanisk nødsenkning

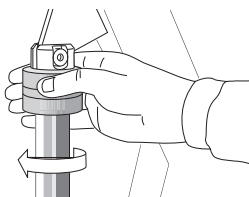


5 Låsning af hjulene

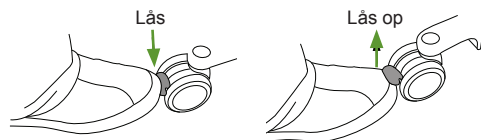

6 Afkrogningsbeskyttelse

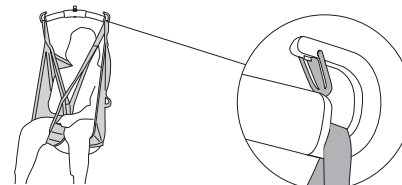


Indstillinger

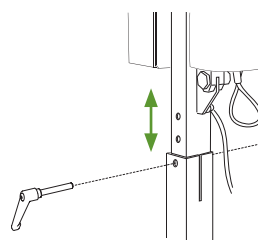

 Læs brugsanvisningen for mere information.

Liftens position ved løft

Fra/til: Seng Stol/toilet Gulv

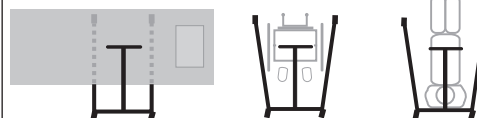

⚠ Skrå løft kan medføre vælterisiko!

 Læs brugsanvisningen for mere information.

Opladning af batterier

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- Nødstoppet skal ikke være trykket ind under opladning.

Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

Rengøring

Rengør liften efter behov, ved af tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand.

 Læs brugsanvisningen for mere information.

Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstoppet ikke er trykket ind, se 2
- batteriet er opladet
- håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades fra www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

7DK150501-03