


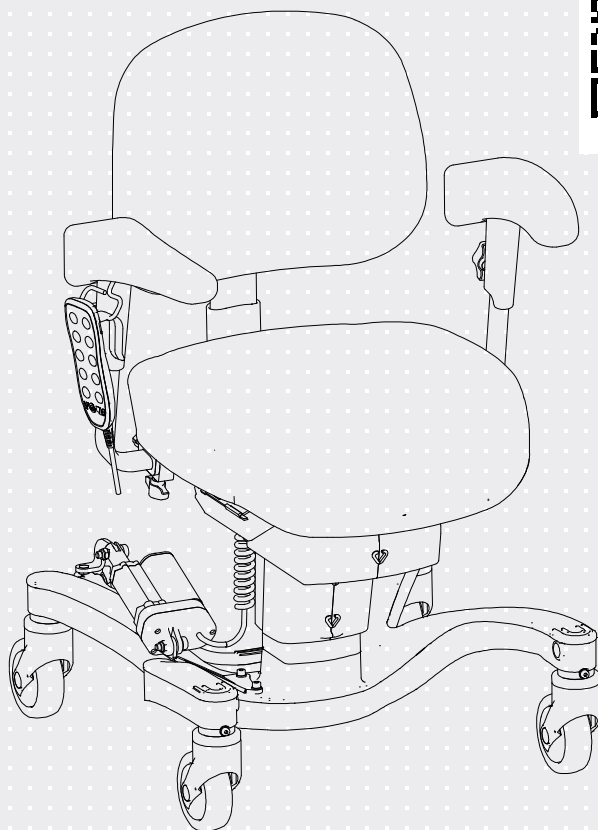

VELA TANGO 700E

Manual. nr. 105791

vela.my/v3dISO 9001
ISO 14001

HÅNDBETJENING

Således betjener du din VELA Tango 700E med Udstigningshjælp



SIDDEHØJDE

Du ændrer din siddehøjde op og ned med pilene. Indstil altid siddehøjden, så den passer til den aktivitet du skal udføre.

INDSTILLING AF SÆDETILT

Hele siddeenheden bevæger sig (sæde og ryglæn) sammen. Indstil sædevinklen fremadrettet eller bagudrettet med pilele, så du føler dig tryk i aktiviteten.

BREMSE

El-bremsen bremses og oplåses via knapperne. Stolen bremser altid, hvis du rejser og sætter dig ved hjælp af udstigningshjælpen.

INDSTILLING AF RYGVINKEL

Ryglænet indstilles frem/tilbage ved hjælp af pilene. Indstil ryglænet så du sidder behageligt.

UDSTIGNINGSHJÆLP

Bremsen låses og sædetilt, ryglænsvinkel og siddehøjde ændrer sig. Pil op gør det trygt at rejse sig sikkert, pil ned gør det tryk at sætte sig ned*.

Udstigningshjælp kan indstilles til give dig en optimal udstigning og en neutral siddeindstilling (se guide på næste side).

*Ud- og indstigningshjælp har hukommelse, så brugeren kan pause sekvensen op til et minut imens denne retter sig i sædet og så genoptage sekvensen. Sekvensen annulleres ved mere end et minuts pause, eller ved tryk på andre knapper (stolen indstiller sig til neutral position, før en ny udstigningssekvens kan påbegyndes).

PERSONLIG TILPASNING AF UDSSTIGNINGSHJÆLP

Bemærk: Få eventuelt hjælp af en terapeut til at indstille en optimal siddestilling og udstigningsposition.



STEP 1: PERSONLIG TILPASNING AF SIDDESTILLINGEN

Sørg for at stolen er bremsset! Indstil siddehøjde, sædetilt og ryglæsvinkel, så du sidder godt og stabilt med fødderne fladt på gulvet. Når stolen er indstillet, trykker du på de to knapper nederst til højre i fem sekunder. Når du hører et klik er indstillingen gemt.

STEP 2: PERSONLIG TILPASNING AF UDSSTIGNINGSHJÆLP

Sørg for at stolen er bremsset! Indstil siddehøjde, sædetilt og ryglæsvinkel, så du står godt og stabilt med fødderne fladt på gulvet. Når stolen er indstillet, trykker du på de to knapper nederst til venstre i fem sekunder. Når du hører et klik er indstillingen gemt.



Ved behov for at nulstille aktuatoren skal du holde begge højdeindstillingsknapper inde (op og ned) på samme tid i 20 sek. Bliv ved med at holde knapperne inde, indtil aktuatoren er kørt helt i bund, og den har kørt ca. 5 mm op igen.

STOLENS FUNKTIONER



Ryghøjde



Rygvinkel



Sædedybde



Bremse



Tilt



Armlænsbredde



Armlæns højde



Elektrisk højdeindstilling



Elektrisk udstigningshjælp