

MONTERING OG OPSÆTNING

Komponenter

Din Elio Core elektriske kørestol leveres i en papkasse. Åbn toppen af kassen, og læg derefter kassen på siden for nemmere at trække kørestolen og indholdet ud.

Joystick



Stol



Værktøj



Oplader



Litiumbatteri x2



Sikkerhedssele



Kopholder



Pude



Brugsanvisning



1. For at folde Elio Core ud, skal du tage fat i toppen af ryglænet og trække opad, samtidig med at du presser ned på sædet for at åbne kørestolen og fuldføre monteringen (se billede 1).






Billede 2

2. Fortsæt med at folde kørestolen ud til siddeposition, indtil du hører et KLIK, som bekræfter, at den er låst i den korrekte position (se billede 2).

3. Find sædepuden og rygbetrækket, der følger med. Placer sædepuden således, at bagsiden af puden og velcrolukningen på undersiden stemmer overens med velcrolukningen på sædet (se billede 3).



Billede 3

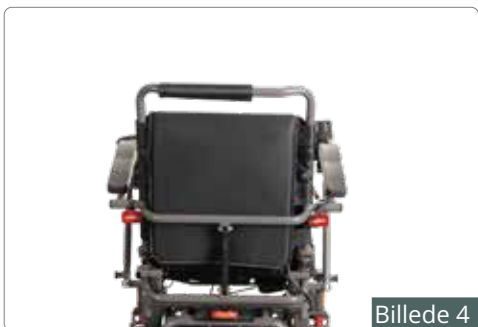

Billede 4

4. Placer derefter rygbetrækket på undersiden af den øverste stang på rygstøtten, og fastgør det til velcrolukningen på begge sider af ryggens spændestropper. Sørg for, at den ene er placeret bag den horisontale rygstag på stolen (se billede 4).

5. Monter joysticket i den åbne holder på armlænet på højre side (kan flyttes til venstre side ved behov) (se billede 5). Stram skruen under armlænet for at fastgøre joysticket (se billede 6).



Billede 5



Billede 6

6. Tilslut controllerens ledningsstik til CPU-ledningsstikket. Sørg for at justere stifterne korrekt i henhold til pilmarkeringen, så de ikke bøjes, knækker eller beskadiges (se billede 7).



Billede 7

Bemærk Sørg for, at kontaktstifterne står «hvid pil» mod «hvid pil».

7. Find kopholderen, der følger med din Elio Core. Sæt kopholderen ind i åbningen på det modsatte armlæn i forhold til joystick-controlleren (se billede 8). Fastgør den ved at stramme fastgørelsesskruen (se billede 9).




Billede 8



Billede 9

8. Den justerbare fodplade har tre udtrækspositioner. For at justere fodpladen til en komfortabel længde skal du trække begge sidestifter ud for at frigøre fodpladen og derefter trække den frem til næste position. Sørg for, at begge stifter er låst i den nye position (se billede 10).

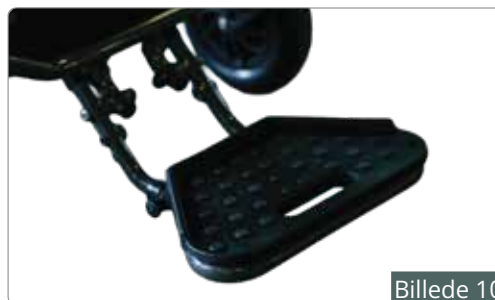

Billede 10

9. For at stige ind fra siden skal du trække i udløserknappen på armlænet og løfte armlænet op i vertikal position for at give den nødvendige plads (se billede 11).



Billede 11

Montering af sikkerhedssele

Sikkerhedsselen kan justeres for optimal komfort. Ved en ulykke vil den holde brugeren sikkert på plads og reducere risikoen for personskade ved sekundær kollision.

1. Montering af sikkerhedssele

Sørg for, at sikkerhedsselen er fastgjort rundt om taljen og til den nederste del af rygstøtterammen på den elektriske kørestol.

2. Justering af sikkerhedsselen efter brugerens komfort:

Fastgør selen, indtil du hører et tydeligt klik. Juster selen til en passende længde.

3. Løsne sikkerhedsselen:

Klem spændet sammen for at åbne selen.

Advarsel!

Sørg for, at sikkerhedsselen er korrekt fastgjort til den elektriske kørestol og justeret til en komfortabel position for brugeren. Kontroller, om selen er løs eller beskadiget. Hvis du opdager et problem, skal du kontakte forhandleren for vedligeholdelse og reparation.

BATTERI


Montering af batteri

Placer batteriet i batteriholderen på begge sider af kørestolen. Hold i batterihåndtaget og før enden af batteriet ind i åbningen på batteriholderen, indtil batteriet er helt på plads (se billede 12).



Afmontering af batteriet

Tryk på den røde batteriknap på batteriholderen samtidig med, at du trækker batteriet ud (se billede 13).

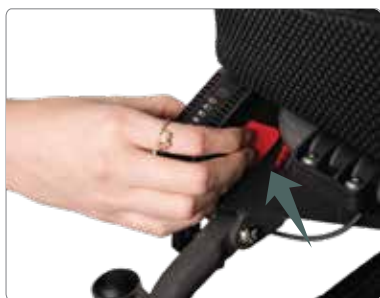

 **Advarsel!**


Sørg for, at strømmen til kørestolen er slået fra, før du gør dette.

JUSTERING AF RYGLÆN

Hvordan justeres ryglæn

Trin:

1. Træk op i håndtaget under sædet på højre side. Kan ændres til venstre side ved behov.
2. Hold håndtaget inde og læn dig bagover, indtil rygstøtten er i den ønskede position, og slip håndtaget.

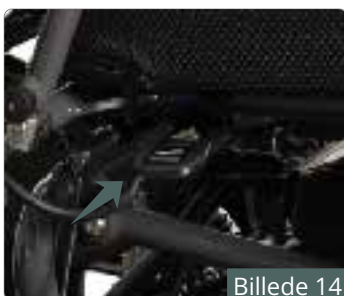

Billede 14



Billede 15

Tilbage til rygøænets oprindelige position

Trin:

1. Træk op i håndtaget på undersiden af sædet.
2. Hold håndtaget inde og læn dig fremover, indtil rygstøtten er tilbage i den ønskede position, og slip håndtaget.
3. Rygstøtten er nu tilbage i den oprindelige position.



Billede 16





Billede 17

SAMMENKLAPNING OG UDFOLDNING

Fremgangsmåde for at klappe kørestolen sammen

1. Hold øverst på rygstøtterammen med én hånd. Med den anden hånd vipper du sikkerhedslåsen bag på rygstøtten ned for at låse op.
2. Løft op i fronten af sædet med hånden for at folde kørestolen.
3. Pres toppen af rygstøtten og fronten af sædet mod hinanden.
4. Klap fodpladen sammen.

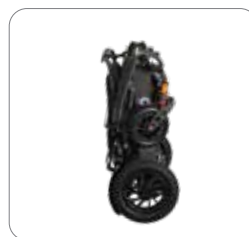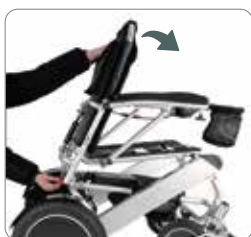

Hvordan kørestolen foldes ud

1. Fold først fodpladen ud.
2. Hold øverst på rygstøtten med én hånd og fronten af sædet med den anden.
3. Pres hænderne væk fra hinanden, indtil du hører et «klik», som bekræfter, at kørestolen er helt foldet ud.



AFTAGELIG MOTOR- OG HJULENHED

Din Elio Core elektriske kørestol kan leveres med hurtigudløsningshjul for at reducere den samlede vægt.

1. For at afmontere baghjulene skal du først frakoble hurtigkoblingskablerne bag på enheden (se billede 19).



Billede 19

2. Fjern låsepinden og skub hjulene vandret af låsepladen (se billede 20).



Billede 20

For at montere hjulene igen udføres ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

JOYSTICK

Kontrolpanel

Elio Core er udstyret med en joystick-controller. De forskellige funktioner er vist nedenfor.



Sænk hastighed
Hver berøring reducerer hastigheden ét niveau.

Øg hastighed
Hver berøring øger hastigheden ét niveau.


Venstre skærmknap
Skifter skærmvisning.

Strømbryder

- Tryk på knappen for at tænde kørestolen og sætte den i standbytilstand.
- Hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke for strømmen.

Højre skærmknap
Skifter skærmvisning.

Advarselslyd
Et pip høres, når kørestolen tændes, og når der trykkes på knapperne på kontrolpanelet.



USB Ladeport

Ladeport



Joystick
Styrer retning, hastighed og bremsekontrol

Joystick og køretips

Advarsel!

1. Undgå skarpe sving ved høj hastighed.
2. Skub køregrebet i den ønskede retning for at styre kørestolen. Grebet regulerer hastigheden proportionalt – jo mere du skubber det, desto højere bliver hastigheden. Den maksimale hastighed er begrænset til 6 km/t
3. Foretag ikke ændringer i joystick-indstillingerne. Hvis du oplever ændringer i, hvordan kørestolen reagerer på styring, skal du kontakte serviceleverandøren.

Betjeningsretning for joystick


Joysticket gør det muligt at styre kørestolen fremad, bagud, til venstre og til højre, samt regulere acceleration, opbremsning og stop.



Når køregrebet står lodret, er kørestolen i standby. Skub grebet frem for at køre fremad. Jo mere det skubbes frem, desto højere bliver hastigheden.



Reducér trykket fremad på køregrebet forsigtigt for at sænke hastigheden. Når grebet vender tilbage til lodret position, stopper kørestolen, og bremserne aktiveres.

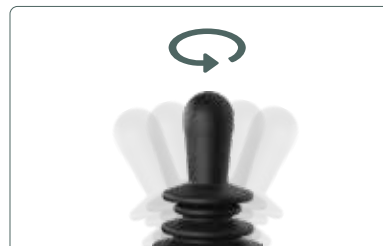

Kørestolen vil dreje til højre, venstre eller køre bagud afhængigt af retningen og hvor meget køregrebet bevæges.


Display

Bluetooth Status




Ikke tilsluttet Tilsluttet

Låsestatus



Ulåst Låst

Temperatur




Overophedet For kold

Advarsel om hastighedsbegrænsning



Advarsel om reduceret hastighed ved lav batterikapacitet. Batteriet skal oplades straks.

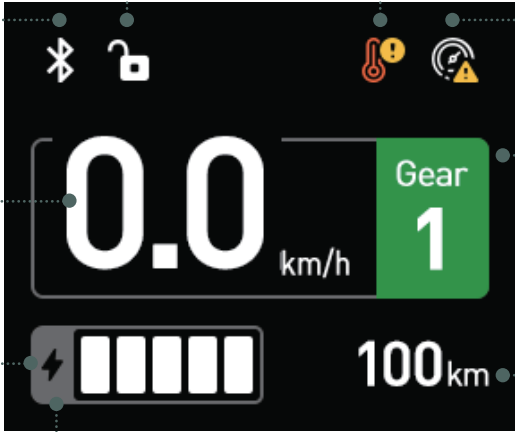

Nuværende hastighed

Batteri-indikator

Hastighedsniveau
Hastighedsniveauet justeres med [+] og [-]-knapperne mellem 1 (lavest) og 5 (højest).

Samlet kørelængde (km)

Lavt batteri

Indikatoren bliver gul, og én bjælke vises. Ikonet for hastighedsbegrænsning vises i øverste højre hjørne.



Tom for strøm

Ikonet for hastighedsbegrænsning i øverste højre hjørne lyser, når batteriniveauet er ved at være tomt.



Opladningsstatus

Det grønne ikon blinker kontinuerligt under opladning.





BANO LIFE

Når den lille forskel betyder alt

Hjælpemidler, som giver dig friheden til at leve på egne præmisser.

Bano Life
Karetmagervej 19B, DK-7000 Fredericia
info@banolife.com
tlf. 75 56 32 44

banolife.dk