



Brugsanvisning – Bima Standard siddepude

Komfortforbedrende siddepude til brugere, der sidder kortere perioder i kørestol, fx ved transport. Brugeren kan selvstændigt foretage stillingsændringer og har ingen særlige siddemæssige udfordringer. Puden er beregnet til brug i almindeligt forekommende kørestole med plan- eller hængekøjesæde. Kuppet bund anvendes ved hængekøjesæde for at opnå en jævn siddeflade, mens plan bund anvendes ved fastere sæder, hvor udjævning ikke er nødvendig.

Siddepuden er et medicinsk udstyr og er CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745. Kategori: 12 25 06 – 01. Produktet er udviklet og fremstillet i Sverige af BIMA Plastteknik AB.

Håndtering

Kontroller, at emballagen er intakt og uden skader. Fjern plastposen og vær opmærksom på den hvide etiket på pudens underside. Denne side skal vende nedad, og pilen angiver bagenden. Den sorte etiket med gul tekst "BAK" viser ligeledes, hvilken side der er bag.



Rengøring og vedligeholdelse

Puden kræver ingen indstilling eller service. For god hygiejne er regelmæssig rengøring tilstrækkelig. Pudebasen rengøres ved forsigtig aftørring med overfladedesinfektion eller med vand og sæbeopløsning. Den kan også rengøres med damp. Pudebasen tørres i et varmt og velventileret rum. Betrækket vaskes i maskine ved 60 °C med lukket lynlås, efterfulgt af centrifugering og tørretumbling eller droptørring i tørreskab. Sørg for, at betrækket monteres korrekt og at alle hjørner sidder rigtigt.

Kvalitetssikring

For at sikre korrekt og sikker funktion i hele produktets forventede levetid (5 år) skal pudebasen kontrolleres for revner og deformationer, og betrækket skal være intakt. Fordybninger under sædeknoglerne indikerer, at puden er slidt og skal udskiftes. Levetiden kan variere afhængigt af brug og vedligeholdelse.

Sikkerhed og forholdsregler

- Puden er udelukkende beregnet til brug i kørestole.
- Pudens størrelse skal passe til kørestolens sæde.
- Opbevar puden tørt og helst ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.
- Undgå at klemme eller bøje puden under opbevaring.
- Puden må ikke anvendes i bilsæder pga. risiko for at glide frem ved hård opbremsning.
- Puden opfylder gældende brandkrav, men kan beskadiges af åben ild, gløder eller stærke varmekilder.
- Undgå regn, dug, skarpe genstande og stærke kemikalier.